



Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik. NasaBulb® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® NasaBulb® odsávačka

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- 2 odsávačky pre malé nosy bábätiok, objem 50 ml
- príbalová informácia s návodom a varovaniami

NeilMed® NasaBulb® nosná odsávačka pomáha hlienu von z nosa dieťaťa, čím robí dýchanie jednoduchším.

Kľúčové vlastnosti NasaBulb®:

- mäkká silikónová špička aj banka
- nový číry dizajn
- sterilizovateľná
- znižuje riziko kontaminácie
- bez BPA a latexu
- sterilizovateľná v mikrovlnnej rúre alebo v pare

Návod - NasaBulb®

NeilMed® NasaBulb® nosná odsávačka pomáha jednoduchšie dostať sa číremu hlienu von, aby dieťa mohlo ľahšie dýchať.

Návod na použitie:

- dôkladne skontrolujte poskladaný prístroj pred každým použitím, aby sa zabezpečilo, že všetky komponenty sú bezpečné a neporušené
- stlačte banku nosovej odsávačky, aby ste vytlačili vzduch
- opatrne umiestnite špičku nosenej odsávačky do nosa dieťaťa, zatiaľ čo banka je stále stlačená
- ľahko uvoľnite tlak na banke pre odstránenie/nasatie hlienu
- opakujte podľa potreby

Ako oddeliť diely pre čistenie:

1. Upchajte špičku jej stlačením palcom a ukazovákom.
2. Palcom a ukazovákom druhej ruky rýchlo stlačte banku a nárast tlaku vzduchu oddelí diely od seba.

Návod na čistenie a sterilizáciu:

Rozoberte všetky komponenty. Umyte teplou mydlovou vodou. Straste prebytočnú vodu. Usušte.

Pre dezinfekciu môžete zvoliť jeden z dvoch spôsobov:

1. dezinfekcia varom: Umiestnite jednotlivé časti do vriacej vody po dobu 5 minút. Pred vybratím súčastí z vody zabezpečte, aby voda úplne vychladla. Straste prebytočnú vodu. Nechajte všetky súčasti dôkladne vyschnúť umiestnením v papierovom obrúsku pred opätovnou montážou.

2. dezinfekcia v mikrovlnke: Vyčistite odsávačku vodou a mydlom, straste prebytočnú vodu. Umiestnite odsávačku do mikrovlnnej rúry po dobu 45 sekúnd. Tak prebehne dezinfekcia všetkých súčastí podľa odporúčaní Neilmed® rovnako ako bolo zverejnené v odborných lekárskejších publikáciách.

Upozornenie pre NasaBulb®

Udržujte mimo dosahu dojčiat a detí. Výrobok je určený na použitie len dospelými osobami.



Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190