



## Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. NeilMed® NasoGel® je zdravotnícka pomôcka.

# NeilMed® NasoGel® nekvapkajúci gélový sprej

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

### Obsah balenia:

- 30 ml sprej so stlačiteľnou pumpičkou
- príbalová informácia s návodom a varovaniami

NasoGel® Spray je nosový sprej s fyziologickým roztokom bez liečiv na báze voderozpustného gélu so soľami kyseliny hyalurónovej na zabezpečenie nosnej vlhkosti.

NasoGel® poskytuje vlhkosť doplnujúce tekutiny pre zlepšenie suchej a podráždenej nosnej dierky spôsobené suchým podnebí a teplým interiérom. To pomáha znížiť sucho v nose počas letov, pri kyslíkových terapiách, rovnako ako príznaky suchosti spôsobenej atrofickou rinitídou, rádioterapiou alebo po operácii dutín.

### Pokyny:

Pomocou čistej vatovej tyčinky alebo prstom s gumovou rukavicou naneste malé množstvo NasoGel®-u do každej nosnej dierky raz za 4 až 6 hodín. V prípade pretrvávajúceho sucha v nose, môžete zvýšiť frekvenciu.

### Varovanie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom. Používajte iba podľa návodu. Nepoužívajte na sucho v ústach.

### NasoGel® nekvapkajúci gélový sprej pomáha zmierniť sucho v nose spôsobené:

- suchým vzduchom
- kyslíkovou terapiou
- zápalom dutín
- alergiami
- bežným nachladnutím

### Výhody, ktoré Nasogel® ponúka:

- sprej s fyziologickým roztokom na báze voderozpustného gélu so soľami kyseliny hyalurónovej a aloe vera
- nekvapkajúce prevedenie spreja
- vynikajúci hydratačný sprej pre suché nosné dierky

## Návod na použitie:

### Pokyny:

Použite 1-2 vstreky NasoGEL®-u do každej nosnej dierky raz za 4 až 6 hodín. V prípade pretrvávajúceho sucha v nose, môžete zvýšiť frekvenciu používania.

### Varovanie:


Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na sucho v ústach. **Nepoužívajte, ak ste alergický na niektorú zo zložiek uvedených na krabičke.**



**Krok 1:** Odstráňte viečko z trysky.



**Krok 2:** Odstráňte modrú bezpečnostnú pásku.

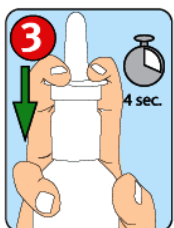

**Krok 3:** Na naplnenie tlakového mechanizmu:

(A) Stlačte trysku a držte ho v dolnej polohe 4 sekundy, ako je znázornené

(B) Uvoľnite trysku

(C) Opakujte kroky a) a b) 4-5 krát, alebo pokiaľ gél vyjde

**DÔLEŽITÉ:** musíte stlačiť tlačidlo a potom držať trysku po dobu celých 4 sekúnd pre maximálny striekací výkon, ako je znázornené na obrázku 3.



**Krok 4:** Po naplnení tlakového mechanizmu je gél pripravený na okamžité použitie.



**Krok 5:** Použitie 2-4 vstreky z NasoGel® spreju do každej nosnej dierky každých 4-6 hodín. V prípade pretrvávajúceho sucha v nose, môže sa zvýšiť frekvenciu použitia.



**Krok 6:** Vymeňte bezpečnostnú pásku a uzáver po použití na zamedzenie vyschnutia. Tryska zostane natlakovaná na niekoľko dní. Potom bude potrebné ju natlakovať znovu, pretože tlak vzduchu sa stratí.



Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica  
[www.cistynos.sk](http://www.cistynos.sk) [info@cistynos.sk](mailto:info@cistynos.sk), mobil: 0907 368 190