

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. NasoGel® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® NasoGel® tuba s gélovým roztokom

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- 1 tuba - 28,4g
- príbalová informácia s návodom a varovaniami

NasoGel® Tube je nosový gél s fyziologickým roztokom bez liečiv na báze voderozpustného gélu so soľami kyseliny hyalurónovej na zabezpečenie nosnej vlhkosti.

NasoGel® poskytuje vlhkosť dopĺňujúce tekutiny pre zlepšenie suchej a podráždenej nosnej sliznice spôsobenej suchým podnebí alebo vykurovaným priestorom. Pomáha znížiť suchu v nose počas letov, po kyslíkových terapiách, rovnako ako príznaky suchosti spôsobenej atrofickou rinitídou, rádioterapiou alebo po operácii dutín.

NasoGel® hydratačný gél pomáha zmierniť suchu v nose spôsobenú:

- suchým vzduchom
- kyslíkovou terapiou
- zápalom dutín
- alergiami
- bežným nachladnutím

Návod na použitie - NasoGel® tuba s gélovým roztokom

Používajte len podľa pokynov, pri pretrvávajúcich problémoch navštívte svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.

Pokyny

Pomocou čistej vatovej tyčinky alebo prstom s gumenou rukavicou naneste malé množstvo NasoGel®-u do každej nosnej dierky raz za 4 až 6 hodín. V prípade pretrvávajúceho sucha v nose môžete zvýšiť frekvenciu.

Varovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom. Používajte iba podľa návodu. Nepoužívajte na suchu v ústach.

Výhody, ktoré NasoGel® ponúka:

- gél s fyziologickým roztokom na báze voderozpustného gélu so soľami kyseliny hyalurónovej a aloe vera
- vynikajúci hydratačný gél pre suché nosné dierky
- použitie každých 4-6 hodín alebo podľa potreby



CISTYnos .sk

Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190

Revízia: 04/2017