



## Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik. Naspira™ je zdravotnícka pomôcka.

# NeilMed® Naspira® náhradné filtre pre odsávačku

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

### Obsah balenia:

- 30 jednorazových filtrov, veľkosť pórov filtra sa pohybuje od 0,15 do 0,25 mm<sup>2</sup>
- príbalová informácia s návodom a varovaniami

NeilMed® Naspira® je inovatívny, unikátne navrhnutý systém na odsávanie nosných dutín.

### Kľúčové vlastnosti Naspira® filtrov:

- bez BPA a latexu
- bezolovnaté
- zabraňujú riziku kontaminácie
- vysoká kvalita filtra
- zabraňuje kontaktu s hlienom

*Poznámka: Filter je na jedno použitie a môže byť použitý iba raz. Tým je bezpečný pre všetkých a prosím nesnažte sa ho sterilizovať alebo umyť.*

## Čistiace a sterilizačné inštrukcie

### Ako oddeliť diely pre čistenie:

1. Zatlačte na otvor špičky s palcom a ukazovákom
2. Stlačte banku palcom a ukazovákom druhej ruky, takže rýchly nárast tlaku vzduchu oddelí časti od seba
3. Rozobrať zostávajúce súčasti ťahom koncov od seba. Vyberte filter a položte ho bokom. Filter nemôže byť čistený ani sterilizovaný, ale môže byť znovu použitý v prípade, že sa nedostane do kontaktu s hlienom. Umyte všetky voľné súčasti teplou vodou s tekutým saponátom a následne dôkladne opláchnite čistou vodou. Prebytočnú vodu straste.

**Filter je na jedno použitie a musí byť vymenený, ak sa dostane do styku s hlienom, alebo po skončení akútneho ochorenia dieťaťa.**



Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica  
[www.cistynos.sk](http://www.cistynos.sk) [info@cistynos.sk](mailto:info@cistynos.sk), mobil: 0907 368 190

Revízia: 04/2017